



eIFU


دستورالعمل استفاده از لوله‌های خون‌گیری تولید شرکت روناک طب ویدا RTV

محصول: CBC/K2EDTA/2ML

Non-Vacuum Blood Test Tubes

محصول: CBC/K3EDTA/2ML

Non-Vacuum Blood Test Tubes

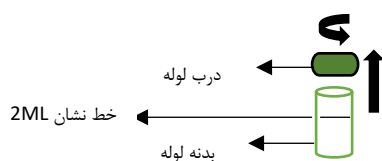

1- بهترین روش باز کردن درب لوله، چرخاندن و به سمت بالا کشیدن درب است.

2- قبل از خون‌گیری، ابزار لازم از قبیل گارو، سرنگ و لوله خون‌گیری را آماده کنید و از وجود ماده ضد انعقاد در داخل لوله اطمینان حاصل نمایید.

3- پس از خون‌گیری، ظرف مدت 10 تا 15 ثانیه با جدا کردن سر سرنگ و اتصال سرنگ با جدار لوله خون را تا خط نشان 2ML به آرامی تخلیه کنید. تا از ایجاد همولیز در خون جلوگیری شود.

4- بعد از بستن درب لوله حتما 6 تا 8 بار لوله را به آرامی تکان دهید تا خون به خوبی با ضد انعقاد مخلوط شود. تا از ایجاد لخته در لوله جلوگیری شود.

5- این محصول برای مقدار 2ML خون ساخته شده است و ضد انعقاد EDTA آن با دقت استاندارد تنظیم شده که بهترین نتایج آزمایش در این محدوده صورت می‌گیرد.

6- به تاریخ تولید و انقضای مندرج بر روی برچسب لوله دقت فرمایید.

7- جهت انجام تست CBC نوزادان به دلیل میزان حجم کمتر خون، از لوله‌های -

CBC/K2EDTA/1ML و CBC/K3EDTA/1ML استفاده می‌شود. میزان ضد انعقاد این لوله‌ها

به مقدار 1ML خون است. رنگ درب لوله CBC نوزادان به رنگ بنفش است. این محصول با این

مشخصات توسط شرکت روناک طب ویدا نیز تولید می‌شود.

8- در صورت داشتن هرگونه انتقاد یا پیشنهاد از محصولات شرکت روناک طب ویدا، با ما از طریق ایمیل یا شماره تماس شرکت در ارتباط باشید.

www.r-tebvida.com

www.r-tebvida.ir

سامانه پیامکی: 09016693332

E-mail: info@r-tebvida.ir

شماره تماس: 03155543022